

Checkliste Probenahme und Versand

Probe	EDTA-Probe	Haarwurzeln	Abstrich	GOcard
Menge	<input type="checkbox"/> 1-2 ml	<input type="checkbox"/> 60-80 Haarwurzeln	<input type="checkbox"/> 2 Tupfer pro Tier	<input type="checkbox"/> mind. 2 Tropfen mit 5 mm Durchmesser
Stabilität	<input type="checkbox"/> gut gemischt	<input type="checkbox"/> sicher aufgeklebt	<input type="checkbox"/> getrocknet	<input type="checkbox"/> trocken
Beschriftung	<input type="checkbox"/> Tier-ID	<input type="checkbox"/> Tier-ID	<input type="checkbox"/> Tier-ID	<input type="checkbox"/> Tier-ID

Als Tier-ID ist jede Information geeignet, die die Probe eindeutig dem Tier zuordnet, das im Begleitschreiben benannt ist (z.B. Name, Chipnummer)

Auftrags-Info

Für alle Probenmaterialien gilt:

Eines der folgenden Dokumente muss der Probensendung beiliegen:

- Kopie oder Vermerk zur Auftragsnummer des zugehörigen Online-Auftrages, oder
- Begleitschreiben mit genauen Angaben zum Einsender, zum Tier sowie den auszuführenden Untersuchungen, oder
- ausgefülltes Auftragsformular des Zuchtvereins, oder
- Auftragsformular generatio

Versand	EDTA-Probe	Haarwurzeln	Abstrich	GOcard
Deutschland/ EU	<input type="checkbox"/> Röhrchen dicht verschlossen	<input type="checkbox"/> Transportkarte in der Schutzhülle	<input type="checkbox"/> 2 Tupferstäbchen in der Hülle, in der es ausgeliefert wurde	<input type="checkbox"/> mind. 2 Tropfen mit 5 mm Durchmesser
	<input type="checkbox"/> Schutzcontainer für das Röhrchen dicht verschlossen			
	<input type="checkbox"/> Plastikumschlag oder Box (KEIN Papierumschlag)	<input type="checkbox"/> passenden Umschlag	<input type="checkbox"/> passenden Umschlag	<input type="checkbox"/> passenden Umschlag
	<input type="checkbox"/> Aufkleber ‚Freigestellte veterinärmedizinische Probe‘			

Bitte beachten:

- Absenderadresse ist vollständig
- passendes Porto
- Umschlag ist sicher verschlossen

Bei Versand aus Drittländern zusätzlich in einer Tasche auf der Rückseite:

- Zollinhaltsklärung
- Handelsrechnung
- Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit

Hinweis:

Die Angaben in dieser Checkliste sind reine Orientierungshilfen und bedingen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit. generatio übernimmt keinerlei Haftung aus den Folgen eventuell nicht zutreffender Informationen. Die einzelnen Bestimmungen unterliegen laufenden gesetzlichen Anpassungen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig und vollständig - eine korrekte Vorbereitung kann viel Ärger ersparen und hilft dem Verlust wertvoller Proben beim Transport vorbeugen.

Weitere Informationen zur Probenentnahme
und zum Probenversand finden Sie auf
unserer Website: www.generatio.de

